

Catéteres PICC Vaxcel® – Con válvula y sin válvula

Guía del paciente



● Hay disponible información sobre su catéter PICC Vaxcel[®] llamando a la línea de información para acceso venoso de Navilyst Medical al 800.513.6876

Catéter central insertado periféricamente (PICC) Vaxcel[®]

Este panfleto proporciona algunas respuestas a preguntas que usted puede tener sobre su catéter PICC y cómo cuidarlo en casa. Recuerde llamar a su médico o enfermera con preguntas específicas y siempre siga las instrucciones que le den.

Contenido

¿Qué es un catéter PICC?.....	2
¿Cómo se coloca el catéter PICC?.....	3
¿Cómo cuido mi catéter PICC Vaxcel?.....	5
¿Debo limitar mis actividades mientras tengo este catéter PICC?.....	6
Protocolos de irrigación recomendados.....	7

¿Qué es un catéter PICC?

Un catéter PICC es un catéter central insertado periféricamente; es un tubo largo y delgado que se coloca en una vena y se introduce hasta que su punta se ubique en una vena muy grande del pecho del paciente. El catéter PICC se puede usar para administrar en la vena medicinas y otros fluidos, como productos sanguíneos y para la nutrición. Este procedimiento se denomina intravenoso. A diferencia de las líneas intravenosas cortas que se le puedan haber colocado al paciente en la mano o el brazo, un catéter PICC puede estar colocado en su brazo muchas semanas o aun meses. También es posible tomar muestras de sangre del catéter PICC que se usarán para exámenes especiales.

Se dispone de una variedad de catéteres PICC. Algunos tienen una válvula y otros no. Los catéteres PICC Vaxcel® con tecnología de válvulas PASV® son catéteres que tienen una válvula en un área localizada al extremo del catéter que se denomina conector. Los catéteres con válvula (como los catéteres PICC Vaxcel) generalmente no tienen abrazaderas como los catéteres sin válvula. Generalmente ambos tipos de catéter se colocan y se cuidan de manera similar.

Su catéter PICC es un tubo hueco y flexible que tiene una o dos aberturas o lúmenes.

Cada lumen puede tener una válvula en el conector del catéter o puede tener una abrazadera.



¿Cómo se coloca el catéter PICC?

Su catéter PICC será colocado por un médico especialmente capacitado. Esto se puede llevar a cabo en su habitación del hospital, en una clínica, en el departamento de rayos X o en otro lugar. Se le pedirá que se acueste, o puede estar sentado, reclinado en una posición baja con el brazo recto. Es importante que esté lo más cómodo posible y que no mueva el brazo durante la colocación del catéter PICC.

Se le limpiará el brazo y se le cubrirá con paños especiales para mantener el área lo más limpia posible (esta técnica se llama técnica estéril). La persona que le coloque el catéter PICC llevará una máscara, una bata, guantes y gorro. Esto es para protegerle y mantener el área limpia durante el procedimiento.

El catéter se inserta de manera que la punta descansa cerca del corazón del paciente.


Éste es el punto de inserción que se cubrirá con un vendaje.



continúa en la página siguiente

Se le administrará una medicina anestésica en el sitio en el que el catéter se va a introducir en el brazo. Esto se hace con una aguja muy pequeña y puede doler. En algunos casos, se puede usar una máquina de ultrasonido, o una máquina especial de rayos X, para ver sus venas. El catéter PICC se introduce en la vena. Cuando el catéter PICC esté colocado, se pondrá un vendaje estéril sobre el sitio de la inserción (el lugar en el brazo donde el catéter PICC entra en la vena). Es posible que se tome una radiografía para asegurarse de que la punta del catéter PICC esté en la posición correcta en una vena del pecho del paciente.

El conector (A) se usará para conectar el catéter al tubo que administrará su medicamento. Algunos catéteres PICC tienen válvulas (B) y otros no las tienen, pero tienen abrazaderas (C).

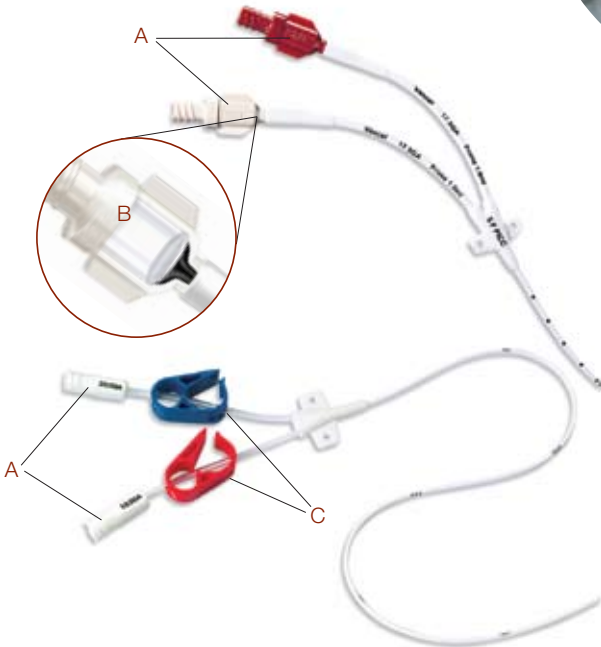

¿Cómo cuido mi catéter PICC Vaxcel®?

Es necesario cuidar y mantener limpio su catéter PICC. El cuidado incluye cambiar el vendaje cada vez que se suelte, se ensucie o se moje y al menos una vez por semana. Esto lo puede hacer el personal médico o, si éste lo sugiere, usted mismo o un familiar o amigo que haya aprendido cómo cambiar el vendaje.



Se colocará una tapa estéril en el conector del catéter.

Esto mantiene el catéter cerrado cuando no se esté usando. Ciertas tapas permiten acceder al catéter sin quitarlas del conector. Algunos catéteres PICC tienen una abertura (lumen) y otros tienen dos.

Notifique a su médico si la(s) tapa(s) se ha(n) aflojado, si se han desprendido, o si gotea(n). Las tapas se deben cambiar al menos una vez por semana, o con tanta frecuencia como su médico sugiera.

Antes de de sacar sangre o de administrar cualquier medicina o fluido, se debe limpiar la tapa y/o el conector con una solución limpiadora especial. Esto se hace para impedir que los gérmenes entren en el catéter. Su médico le enseñará cómo limpiar la tapa.

¿Debo limitar mis actividades mientras tengo este catéter PICC?



Doblar el brazo, estirarlo y realizar actividades cotidianas no dañará su catéter PICC. No debe levantar objetos pesados ni colgarse objetos de su brazo doblado que puedan poner presión en el catéter PICC o en el vendaje.

Si su médico lo aprueba, puede ducharse o tomar un baño con el catéter PICC colocado, siempre y cuando cubra el catéter PICC y el vendaje

con un envoltorio plástico, una bolsa de plástico o un material que impida que se moje. NO debe realizar otras actividades, como nadar, que puedan hacer que el catéter o el vendaje se mojen. Un vendaje o catéter mojado pueden hacer que usted corra riesgo de infección.

Comuníquese con su médico o busque atención médica si tiene:

- Enrojecimiento, dolor o hinchazón en el punto de inserción del catéter PICC o en el brazo
- Fiebre, escalofríos o vómitos
- Cualquier problema con su catéter cuando le esté dando mantenimiento
- Dificultades para administrar medicamentos o para sacar sangre
- Un catéter que está dañado de cualquier manera, que tiene fugas o que está roto o fracturado

CATÉTERES PICC VAXCEL CON VÁLVULA Y SIN VÁLVULA

INDICACIONES: TEI catéter PICC Vaxcel® con tecnología de válvula PASV® está indicado para establecer el acceso periférico al sistema venoso central a fin de administrar fluidos tales como: agentes de hidratación, antibióticos, los usados para quimioterapia, analgésicos, los usados para terapia nutricional y productos sanguíneos, entre otros. También está indicado para la extracción de muestras de sangre. Este producto está indicado para el acceso venoso central en adultos, niños y bebés que necesitan terapia intravenosa (IV).

El uso del sistema de catéter PICC Vaxcel está indicado cuando se prescriben cateterismos venosos centrales o la administración intravenosa prolongada de fluidos, medicamentos y terapia nutricional. Se pueden utilizar distintas zonas de inserción, dependiendo del paciente y el tamaño de catéter seleccionado. Aunque se puede utilizar cualquier vaso apropiado para la inserción, la vena basilíca es la que se usa con más frecuencia. La ubicación del extremo distal del catéter debe proporcionar la dilución máxima para cualquier terapia que sea necesaria y la seguridad de un acceso vascular continuo e inalterable.

CONTRAINDICACIONES: Trombosis venosa en toda la vena (o en cualquier porción de ella) en donde el catéter estará alojado; condiciones que impidan el regreso venoso de la extremidad, como parálisis o linfodema posterior a la mastectomía; afecciones ortopédicas o neurológicas que afecten la extremidad; anticipación o presencia de injertos para diálisis u otros dispositivos intraluminales, tales como marcapasos; hipercoagulación (a menos que se tomen medidas para colocar al paciente en tratamiento anticoagulante); venas antecubitales inadecuadas; infección activa cutánea o subcutánea en las inmediaciones o en el punto de inserción del catéter; distorsiones anatómicas causadas por cirugía, lesiones o traumatismo; o irregularidades anatómicas (estructurales o vasculares) que puedan dificultar la inserción o el mantenimiento del catéter.

PRECAUCIONES: Se debe tener cuidado cuando se use alcohol o acetona. Dejar que se seque completamente el alcohol o la acetona durante el cuidado y mantenimiento de rutina. No utilice soluciones yodadas con base de alcohol o de acetona en ninguna parte de los tubos del catéter PICC Vaxcel. El catéter PICC Vaxcel con tecnología de válvulas PASV está diseñado para ser usado con una técnica de conexión "directa al conector". Colocar una tapa de cierre estéril en el conector para evitar la contaminación cuando no se use. Al usar una aguja más larga de 3/4 in. (1.90 cm) se pueden producir daños en la válvula. No sobrepase de 40 psi/276 kPa (207 cmHg) en las bombas de infusión durante la administración de fluidos.

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos y otras leyes fuera de EE. UU. restringen la venta de este dispositivo salvo a un médico o por órdenes del mismo. Consultar las Instrucciones de uso para obtener las instrucciones completas.

El personal médico debe consultar las Instrucciones de uso para obtener las instrucciones completas.

TARJETA PORTÁTIL

Lleve siempre consigo la tarjeta portátil de su catéter PICC Vaxcel®.

Esta tarjeta tiene información importante sobre su catéter que los médicos necesitarán para atenderlo.

Ponga su información personal en las áreas correspondientes. Su tarjeta portátil tiene el tamaño adecuado para que quepa en su cartera.



26 Forest Street
Marlborough, MA 01752
Customer Service: 800.833.9973

TARJETA PORTÁTIL

NOMBRE DEL PACIENTE: _____

TELÉFONO: (TRABAJO) _____ (CASA) _____

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: _____

TELÉFONO: (TRABAJO) _____ (CASA) _____

NOMBRE DEL MÉDICO: _____

TELÉFONO: _____

FECHA DE INSERCIÓN: _____ 3FSL 4FSL 5FSL 5FDL 6FDL

LONGITUD RECORTADA: _____ N° DE LOTE.: _____

Catéter central insertado
periféricamente (PICC) Vaxcel[®]

TARJETA PORTÁTIL

Es posible conseguir soportes para este producto y otros productos de acceso venoso de Navilyst Medical llamando a la línea de información de Navilyst Medical al

800.513.6876



Navilyst Medical, Inc.
26 Forest Street
Marlborough, MA 01752
www.navilystmedical.com

For more information, call
800.833.9973

Las personas que aparecen
en este folleto son modelos
y se incluyen sólo para fines
ilustrativos.

© 2008 Navilyst Medical, Inc., or its affiliates.
All rights reserved.

NAVPE110S / 5.5M / 11/08